

MIF

מינסטר פודאקס בע"מ

קוקידנט – משחת הצמדה לשיניים תותבות

להצמדה חזקה במיוחד. מקנה הרגשת בטחון באכילה, דיבור וצחוק.
מונעת חדירת שיירי מזון מתחת לתותבות.

הוראות שימוש:

- לנקות ולייבש את השיניים התותבות
- למרוח את משחת ההצמדה בפסים דקים כפי שמופיע באיור
- להכניס את התותבת לפה ולהדק



חשוב

- אין להשתמש בכמות גדולה יותר של משחת ההצמדה, מכפי שמופיע באיור (לא יותר מ-1.25 גרם או 10 ס"מ, בהתאם לפסים כפי שמופיעים על האריזה). במידה והמוצר גולש החוצה, השתמשו בכמות גדולה מדי.
- אין להשתמש במוצר יותר מפעם אחת ביום.
- אין להשתמש בכמות מופרזת של המשחה עבור תותבת שאינה מונחת היטב.
- אין להשתמש יותר מהמוזכר לעיל. מכיל קלציום (סידן), יש להתייעץ עם רופא במידה ונעשה שימוש בתכשירים נוספים המכילים קלציום (סידן).
- יש לדאוג לביקורת סדירה של התותבת אצל רופא השיניים. תותבת שאינה מונחת היטב עלולה לפגוע בבריאות.

במידה והנכם מרגישים תחושת בלבול או תופעות לוואי אחרות שאינן צפויות, יש להפסיק את השימוש בתכשיר ולפנות אל רופא השיניים או הרופא המטפל.

משחת קוקידנט "קומפליט" חזקה במיוחד ניטרלי מכילה:

Calcium/Zinc, PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica,

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין להשתמש כאשר קיימת רגישות לאחד מהרכיבים הנ"ל.

כשר פרווה לפסח ולכל ימות השנה בהשגחת הרב הוד-הוכוולד ובאישור הרבנות הראשית לישראל

מומלץ להשתמש מדי יום בטבליות "קוקידנט" לניקוי התותבת.